

事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 特別養護老人ホーム 八女の里	業務区分	制定年月	令和元年7月
	<input checked="" type="checkbox"/> 介護老人福祉施設 八女の里			
	<input checked="" type="checkbox"/> ユニット型特別養護老人ホーム ステイン八女の里	<input checked="" type="checkbox"/> 機器取り扱い	改訂年月	
	<input checked="" type="checkbox"/> ユニット型介護老人福祉施設 八女の里	<input type="checkbox"/> その他		
	<input checked="" type="checkbox"/> 介護付き有料老人ホーム グラン八女の里			

業務名	
-----	--

【目的】 車両取扱いの徹底を図る目的とする。



1、トランクを開ける。赤○をひくとスロープがたおれる。



2、赤□のボタンを押して上から伸びてきているグレーのベルトを引っ張り車イス前面に引っ掛ける。



3、先ほどの赤□ボタンの上にあるリモコンを取り、赤い「電源」ボタンを押し「▲」ボタンを押し続けると、車椅子を引っ張り上げる。

事業区分	<input type="checkbox"/> 特別養護老人ホーム 八女の里	業務区分	制定年月	改訂年月	
	<input type="checkbox"/> 介護老人福祉施設 八女の里				<input type="checkbox"/> 基本業務
	<input type="checkbox"/> ユニット型特別養護老人ホーム ステイン八女の里				<input type="checkbox"/> 機器取り扱い
	<input type="checkbox"/> ユニット型介護老人福祉施設 八女の里				<input type="checkbox"/> その他
	<input type="checkbox"/> 介護付き有料老人ホーム グラン八女の里				

業務名	
	4、中央に見える黄色い△が車椅子タイヤの中央に来るようにするが少し手前で止める。
	5、赤いフックをかけて、余分なベルトのゆるみを取る。 (写真の紐を引っ張る)
	6、最後にリモコンで「▲」を押して、さらに車椅子を引き上げ、ベルトのたるみがなくなれば固定した事になる。
	7、シートベルトを右上から左下に肩ベルトを1本、左下から右下に腰ベルトを1本かける。
	8、スロープを上げ、トランクを閉める。
	☆降りる際☆
	、シートベルトを外す。
	、リモコンで「▼」を少し押し、赤いベルトを緩めて外す。
	、「▼」を長押し、車椅子を車から降ろす。
	、グレーのフックを外す。
	【注意点】
	・車椅子をきちんと中まで入れないと、スロープを上げる際に車椅子に当たる可能性がある。
	・スロープを上げる際、少し強めに抑えないと半ドア状態になる。
	・天井が比較的低い為、介助時には注意する。
	・「▼」を押した際、そのまま下がらずに1度上に上がってから下がるため注意する。 ※使用後、ガソリンが半分を切っていたら給油しておく。

